



Sano VOUS donne la
priorité!

LIFTKAR[®] PT
Monte-escaliers électriques

SANO 
makes life easier. 



AVEC LIFTKAR PT

EN SÉCURITÉ DANS LES ESCALIERS. FACILE À UTILISER.

LA QUALITÉ DE VIE C'EST AUSSI DE PROFITER PLEINEMENT DE LA VIE, ENSEMBLE.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne ne peut plus utiliser provisoirement les escaliers, ou de façon permanente. Pour les personnes qui ont besoin d'aide, Sano propose des monte-escaliers puissants, faciles à utiliser, sûrs et utilisables sans efforts excessifs.

Fiabilité à l'intérieur et à l'extérieur

Cave, rez-de-chaussée, premier étage, jardin ... avec le LIFTKAR PT vous pouvez profiter pleinement de votre maison.

Et plus encore: aller chez le médecin ou au bureau de poste. Tout devient beaucoup plus facile: profiter d'une voiture pour visiter parents et amis, des voyages en avion ou en train, aller au théâtre ou une exposition.

Un pack batterie puissant, le chargeur mobile (disponible en tant qu'accessoire) et un changement rapide de batterie vous assurent que le LIFTKAR PT est toujours prêt à vous aider à tout moment.

Des solutions adaptées pour des besoins spécifiques:

LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:

Monte-escaliers électriques avec siège intégré.

LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:

Monte-escaliers électriques pour une utilisation avec un fauteuil roulant.



PT S 130/160



IDÉAL À DOMICILE ...

Équipé d'un siège confortable et d'accoudoirs relevables, doté d'un revêtement caoutchouté antidérapant, le PT S est le monte-escaliers idéal pour l'intérieur et autour de la maison.

Grâce à sa compacité, le PT S est particulièrement adapté à une utilisation dans des escaliers étroits ou en colimaçon.

| | |
|--|--|
| Capacité et référence du Liftkar standard (incluant batterie et le chargeur) | PT S 130: 130 kg* Art. n° 045 723 PT S 160: 160 kg* Art. n° 045 724 |
| | *Poids du passager |
| Poids total | 34,8 kg |
| Poids du composant le plus lourd | 21 kg (Unité avec siège) |
| Hauteur totale | 1130 mm |
| Largeur totale | 505 mm (Avec accoudoirs) |
| Profondeur | 675 mm |
| Espace minimum nécessaire sur palier | 0,8 x 0,9 m |

appareil avec accessoires



PT Outdoor 120/150



... ET EN PLEIN AIR

Grâce à sa conception robuste, ses grandes roues non-marquantes, son système de freinage à l'intérieur des jantes et son empattement important, le PT Outdoor est l'appareil idéal pour se déplacer à l'extérieur.

Emportez simplement votre PT Outdoor avec vous pour rendre visite à des amis ou parents.

| | |
|--|--|
| Capacité et référence du Liftkar standard (incluant batterie et le chargeur) | PT Outdoor 120: 120 kg* Art. n° 045 725 PT Outdoor 150: 150 kg* Art. n° 045 726 |
| | *Poids du passager |
| Poids total | 37,7 kg |
| Poids du composant le plus lourd | 24,9 kg (Unité avec siège) |
| Hauteur totale | 1130 mm |
| Largeur totale | 505 mm (Avec accoudoirs) |
| Profondeur | 675 mm |
| Espace minimum nécessaire sur palier | 0,8 x 0,9 m |

appareil avec accessoires



PT Uni 130/160



LE PROFESSIONNEL POLYVALENT

Pour les fauteuils roulants manuels et chaises de transport: avancez simplement sur la plate-forme, verrouillez la retenue arrière (plage de serrage standard entre 330 à 500 mm), activez les freins du fauteuil roulant et vous êtes prêt à partir!

Compact une fois replié, rapide à ranger. Idéal pour les collectivités, professionnels de santé et du transport de personnes.

| | |
|--|--|
| Capacité et référence du Liftkar standard (incluant batterie et le chargeur) | PT Uni 130: 130 kg* Art. n° 045 727 PT Uni 160: 160 kg* Art. n° 045 728 |
| | *Poids du passager + fauteuil roulant |
| Poids total | 276 kg |
| Poids du composant le plus lourd | 16,7 kg (avec appuis latéraux) |
| Hauteur totale | 1130 mm |
| Largeur totale | 760 mm (appuis abaissés) 395 mm (appuis relevés) |
| Profondeur | 385 mm |
| Espace minimum nécessaire sur palier | 1,1 x 0,9 m |



PT Adapt 130/160



S'ADAPTE À VOTRE FAUTEUIL ROULANT

Les adaptateurs sur mesure, qui permettent d'utiliser le LIFTKAR PT avec votre propre fauteuil roulant, sont montés par des ateliers spécialisés et agréés.

LIFTKAR PT Plus 125 Art. Nr. 045 729

La solution complète: LIFTKAR PT Adapt est fourni avec un fauteuil roulant prééquipé, pour les personnes pesant jusqu'à 125 kg.

| | |
|--|---|
| Capacité et référence du Liftkar standard (incluant batterie et le chargeur) | PT Adapt 130: 130 kg* Art. n° 045 721 PT Adapt 160: 160 kg* Art. n° 045 722 *Poids du passager + fauteuil roulant |
| Poids total | 24,7 kg |
| Poids du composant le plus lourd | 15,2 kg (unité) |
| Hauteur totale | 1130 mm |
| Largeur totale | 482 mm (sans fauteuil roulant) |
| Profondeur (sans fauteuil roulant) | 385 mm |
| Espace minimum nécessaire sur palier | 0,9 x 0,9 m |



photo symbolique

PT Fold 130/160



IDÉAL POUR LE TRANSFERT DE PATIENTS

Equipé de roues de 200 mm de diamètre et doté d'une largeur de voie de 297 mm, le PT Fold est l'appareil idéal pour les escaliers en colimaçon particulièrement raides et étroits. Une fois replié, le PT Fold se transporte facilement dans n'importe quel véhicule.

La surface du siège est lavable et peut être retirée pour simplifier le nettoyage.

| | |
|--|--|
| Capacité et référence du Liftkar standard (incluant batterie et le chargeur) | PT Fold 130: 130 kg* Art. n° 045 731 PT Fold 160: 160 kg* Art. n° 045 732 *Poids du passager |
| Poids total | 28 kg |
| Poids du composant le plus lourd | N/A |
| Hauteur totale | 1130 mm |
| Largeur totale | 430 mm (siège) 482 mm (poignée) |
| Profondeur | 660 mm (405 mm plié) |
| Espace minimum nécessaire sur palier | 0,8 x 0,9 m |



Caractéristiques techniques communes à tous les modèles

Vitesse ascensionnelle: le bouton de commande permet de sélectionner trois vitesses différentes:

I = 10 marches par minute

II = 14 marches par minute

III = 18 marches par minute

Hauteur de marche maximale: 205 à 220 mm
(la hauteur maximale est atteinte avec un angle plus réduit)

Autonomie de charge: dépend beaucoup du poids du passager et de l'effort à fournir (montée ou descente). Toutefois, un nombre de 300 à 500 marches peut être considéré comme une première indication.

En cas d'utilisation fréquente (p. ex. professionnels de transport), il est possible d'utiliser à tout moment une seconde batterie. Un chargeur véhicule est également disponible pour recharger rapidement la batterie pendant le transport en voiture.

Tension et capacité de la batterie: 24 VDC -5.2 Ah

Protection contre les surcharges:

- 1) protection mécanique (limiteur de couple à friction)
- 2) protection électronique

Roues principales: pneus gris, souples et non tachants. Les roues du PT-Outdoor ont un diamètre de 260 mm (traces externes 430 mm). Tous les autres modèles ont un diamètre de 200 mm (trace externe 297 mm).

Roues d'appui: également pneus gris et non tachants, freinées en permanence, d'un diamètre de 80 mm.

Largeur intérieure du châssis du fauteuil roulant: minimum 320 mm (PT-Adapt et PT-Uni)



ENCORE PLUS DE MOBILITE

LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOS VOYAGES

LÉGER ET LOGEABLE DANS N'IMPORTE QUEL VÉHICULE

Et avec le chargeur de voyage, vous pouvez recharger le bloc batterie sur une prise 12V lors de vos déplacements – afin que votre LIFTKAR PT soit prêt à l'action à chaque arrêt.

Construction modulaire légère

Rapide et facile à démonter en 3 parties. Il suffit de prendre votre LIFTKAR PT avec vous - les composants légers sont faciles à ranger dans de coffre de votre voiture.



rapidement démontable en 3 parties –
logeable dans tous les coffres de voiture





MOBILITÉ POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES

L'OUTIL INDISPENSABLE POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS

ROBUSTE, FIABLE ET DISPONIBLE A TOUT MOMENT.

Le LIFTKAR PT est idéal pour les services d'assistance d'urgence et les ambulanciers car il permet un transfert de personnes (jusque 160 kg) en toute sécurité et en préservant votre dos.

Convient à tous les types d'escaliers (droits et courbes), de hauteurs de marche (même inégales) et de revêtements de sols tels que la pierre, le marbre, le bois, la moquette ...



peu de travail pour l'assistant –
ergonomique, facile d'utilisation, sûr



LES ACCESSOIRES LIFTKAR PT

LA QUALITÉ DE VIE, C'EST AVOIR UNE SOLUTION SUR MESURE.

Les accessoires pour les monte-escaliers LIFTKAR PT sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins individuels et aux exigences des personnes ayant des difficultés à se déplacer. La qualité de la solution technique proposée et le design sont pour SANO de la plus haute importance.



Chargeur secteur BC-PT (Fiche CE)

Art. n° 045 141



Bloc batterie encliquetable BU-PT

poids 4,3 kg, capacité 5,2 Ah, tension 24 VDC
Art. n° 004 150



Chargeur véhicule (12V-24V) BC 10-30 VDC-PT

Art. n° 945 120



Accoudoirs rembourrés

Art. n° 945 148



Repose-pieds relevable

Art. n° 945 157



Appuie-tête réglable

Art. n° 947 013



Accoudoirs élargis

Ecartement de 54 cm [standard 44 cm]
Art. n° 945 146




Différents systèmes de ceinture

Ceinture ventrale, art. n° 945 144 / Ceinture ventrale/poitrine,
art. n° 945 118 Harnais 5 points, art. n° 945 158



Adaptateur pour chargeur

Prise anglaise, art. n° 045 142 / Prise américaine,
art. n° 045 143 / Prise australienne, art. n° 045 144

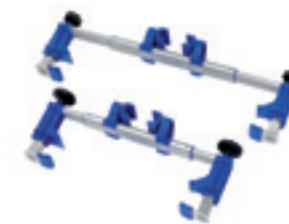

Retenue arrière pour PT Uni

Large: 360-560 mm, art. n° 945 131
Étroit: 270-380 mm, art. n° 945 114





SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Autriche

Tél. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 5
83080 Oberaudorf
Allemagne

Tél. +49 8033 / 308 96-0
Fax +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tél. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@liftkardirect.com

www.liftkardirect.co.uk



LIFTKAR® PT

Monte-escaliers électriques

SANO 
makes life easier.